

Medtronic

Repensando a embolização.


MVP™ | Sistema de micro plugue vascular






Redução de artefatos na TC em comparação com as molas.²

MVP™

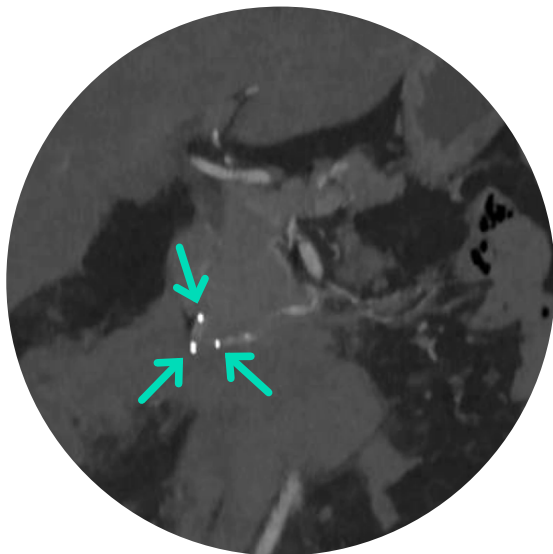

Molas

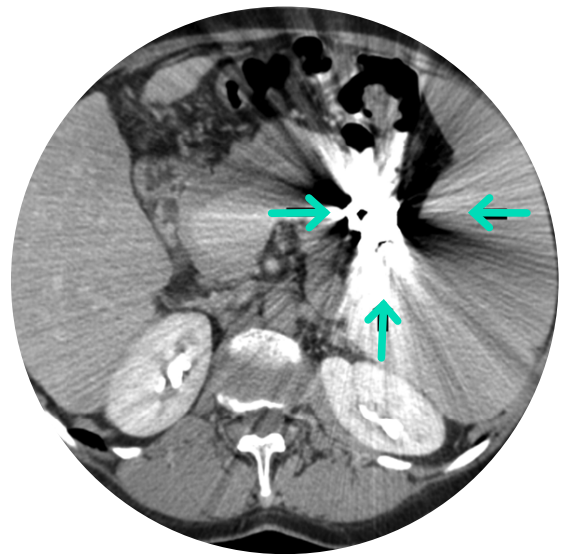


As imagens são propriedade da Medtronic



Oclusão mecânica imediata.¹

Não depende da formação de trombo¹

É necessário apenas um dispositivo (MVP™) quando em comparação com o uso de molas.¹

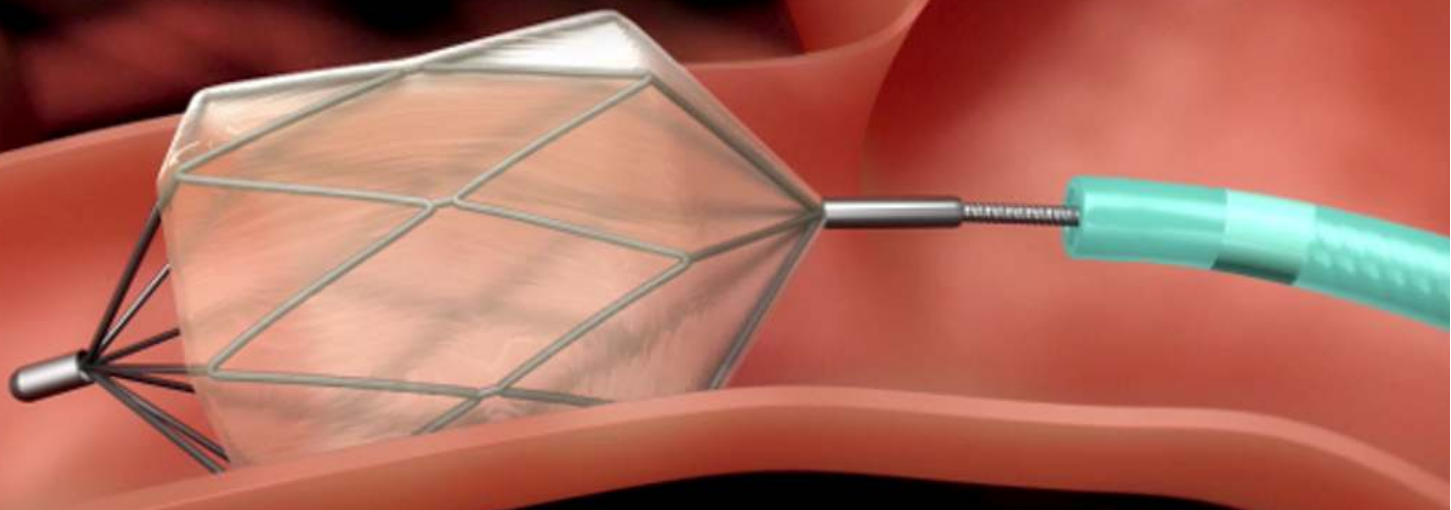




Previsibilidade em ambientes desafiadores.^{1,3}


Avança facilmente através de vasos tortuosos ^{1,3}

Totalmente recuperável e reposicionável em todos os tamanhos*³

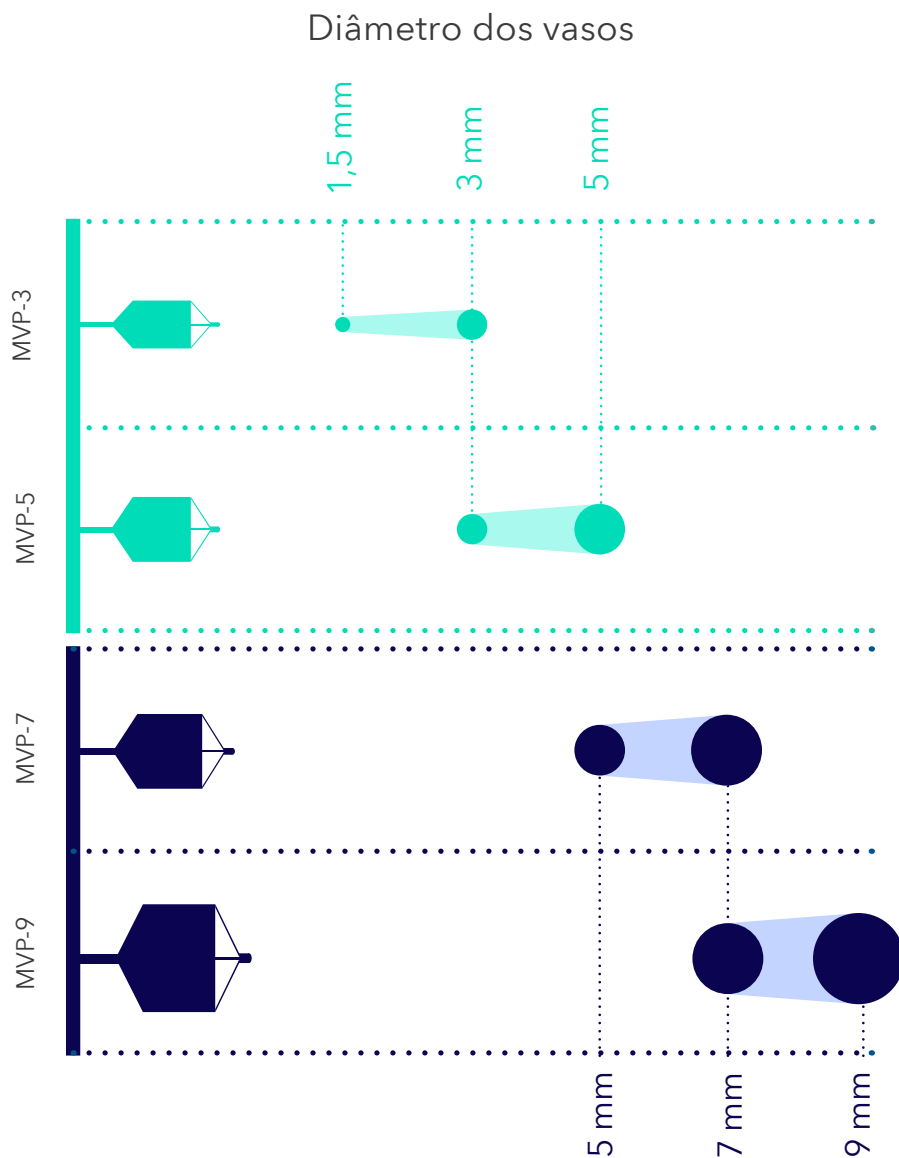

Microcatéter de entrega

Catéter de diagnóstico de entrega

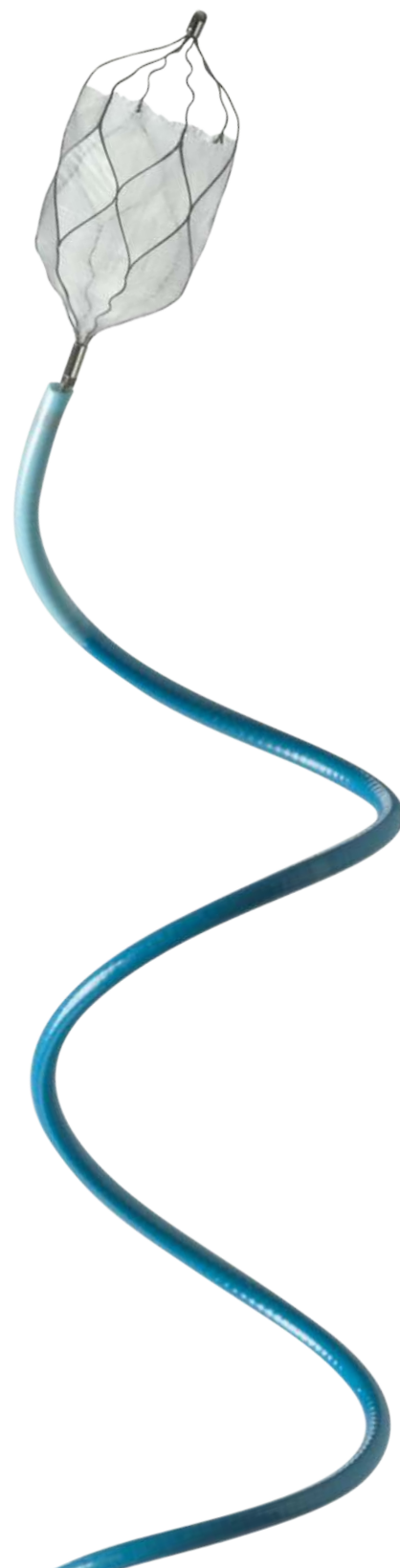

*Até três vezes, após implantação parcial ou completa.

Características disponíveis para o MVP™

Código do produto	Tamanho recomendado do vaso	Diâmetro externo distendido	Comprimento distendido	Comprimento do fio de entrega	Microcatéter ID mínimo recomendado	Comprimento máximo recomendado do microcatéter / catéter
MVP-3Q	1,5-3,0 mm	5,3 mm	12 mm	180 cm	0,021 in	153 cm
MVP-5Q	3,0-5,0 mm	6,5 mm	12 mm	180 cm	0,027 in	153 cm
MVP-7Q	5,0-7,0 mm	9,2 mm	16 mm	165 cm	0,041 in (4 Fr)	120 cm
MVP-9Q	7,0-9,0 mm	13,0 mm	18 mm	165 cm	0,043 in (5 Fr)	120 cm

Referências:

1 Pellerin O, Maleux G, Déan C, Pernot S, Goltzarian J, Sapoval M. Microvascular plug: a new embolic material for hepatic arterial skeletonization. Cardiovasc Intervent Radiol. December 2014;37(6):1597-1601.

2 Park JJ, Park JM. Reduced Metal Artifacts on CT Utilizing the Medtronic MVP™ Microvascular Plug System. EVT. October 2017;16(10):34-36.

3. Dados de teste arquivados na Medtronic. Os resultados dos testes de bancada podem não ser indicativos de desempenho clínico

Informações importantes: Indicações, contra-indicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na etiqueta do produto fornecida com cada dispositivo.

Os resultados podem variar. Nem todos os pacientes alcançam os mesmos resultados.

Indicações de uso: O sistema de micro plug vascular MVP™ é indicado para obstruir ou reduzir a taxa de fluxo sanguíneo na vasculatura periférica.

Cuidado: A lei federal (USA) restringe a venda, distribuição e uso desses dispositivos por médicos ou mediante prescrição médica.

CONTEÚDO EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Registros Anvisa:10349001296_MVP © 2023 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logotipo da Medtronic e "Engenharia para o extraordinário" são marcas registradas da Medtronic. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa Medtronic. 06/23

Medtronic