


SOLUÇÕES PARA O **TRATAMENTO DO** **ANEURISMA** **SOLITAIRE™ AB** DISPOSITIVO DE REMODELAGEM NEUROVASCULAR

TOTALMENTE
IMPLANTÁVEL¹
COMPLETAMENTE
RECUPERÁVEL¹

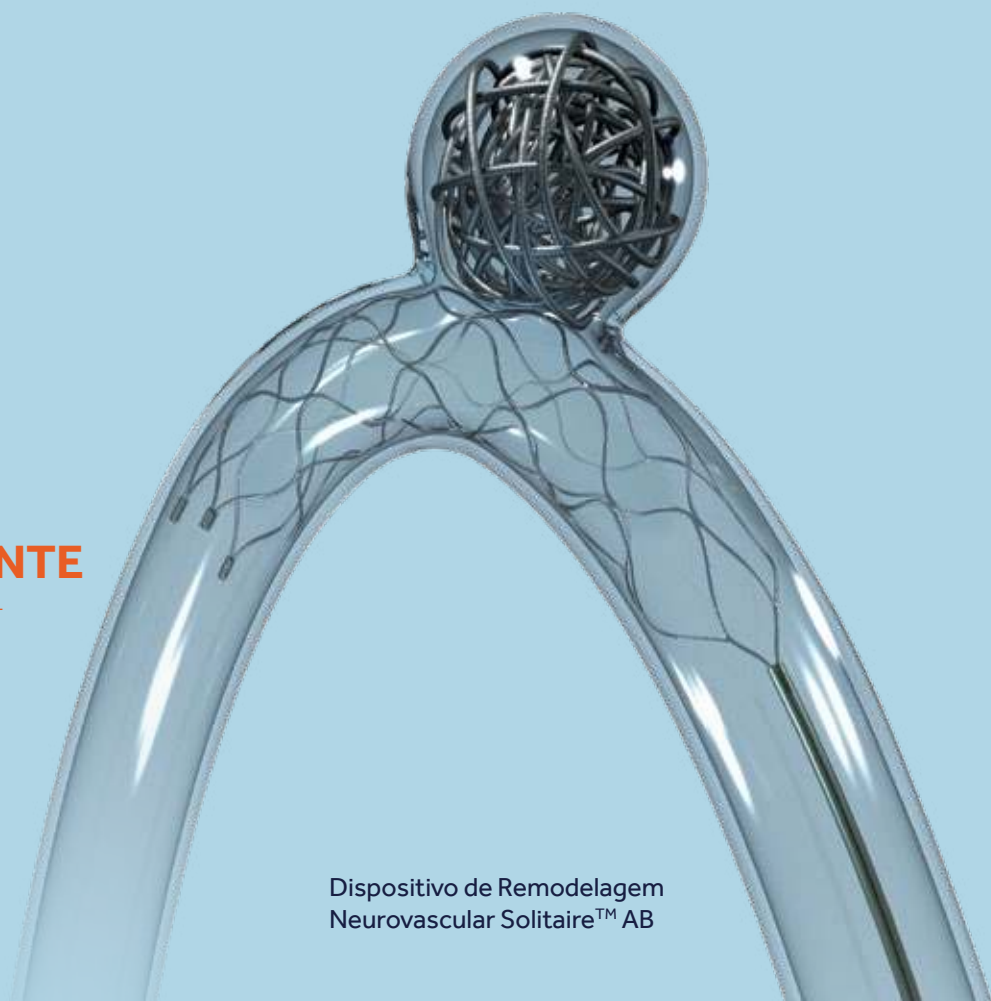

Dispositivo de Remodelagem
Neurovascular Solitaire™ AB

SOLITAIRE™ AB

DISPOSITIVO DE REMODELAGEM NEUROVASCULAR AB

O dispositivo Solitaire™ AB é o único stent autoexpansível² com um design exclusivo para remodelar o colo de aneurismas que pode ser completamente recuperado, mesmo quando totalmente implantado para controle incomparável de procedimento.¹



FACILIDADE NA ENTREGA


- Projetado para entrega e implantação de único operador para uso fácil
- Entrega através de um microcateter padrão com ID 0,021" ou 0,027" em um fio de entrega de 0,016", para se comportar como uma mola
- Projetado para melhor adaptação e navegação do vaso, para se adaptar facilmente a anatomia tortuosa dos vasos

SUPOORTE DE MASSA DE MOLAS OTIMIZADA

- Projetado para a suporte ideal para evitar a herniação da mola no vaso principal

PRECISÃO E CONTROLE DE IMPLANTAÇÃO

- O dispositivo de remodelagem Solitaire™ AB permite várias recuperações, mesmo após o ajuste completo da implantação e colocação superior¹
- Possui destacamento eletrolítico para controle do destacamento após a implantação. O dispositivo de remodelagem Solitaire™ AB pode ser destacado antes ou depois da embolização com molas¹
- Quando não destacado, o dispositivo de remodelagem Solitaire™ AB pode ser mantido ou colocado sem risco de migração do stent durante a colocação da mola ou uso de balão¹

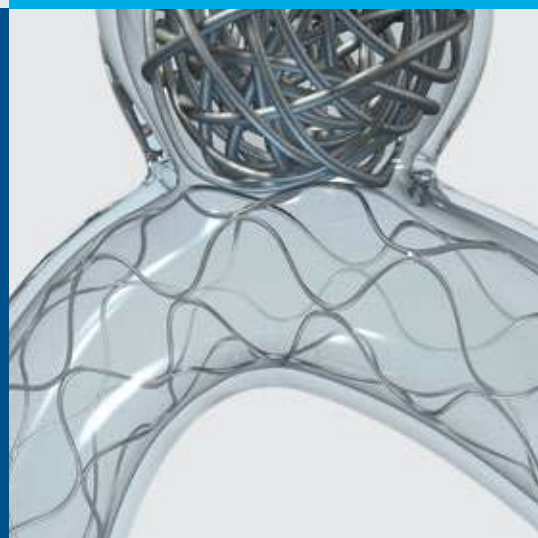




A DIFERENÇA ESTÁ NO DESIGN

O dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB, com a exclusiva tecnologia Parametric™, é a solução adequada para auxiliar os procedimentos de embolização, atuando como uma barreira física em aneurismas de colo largo e blisters para reter as molas e evitar a herniação da mola na artéria-parental.

TECNOLOGIA PARAMETRIC™

A tecnologia patenteada do dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB, com design de fenda aberta, sobreposição e estrutura de células estáveis, oferece vantagens clínicas específicas, combinando os benefícios dos dispositivos de células fechadas sem comprometer a flexibilidade e a entrega típicas de dispositivos de design de célula aberta³.

Fenda aberta, característica de sobreposição do dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB para um suporte ideal e adaptação do vaso.

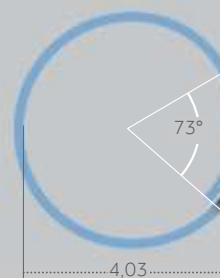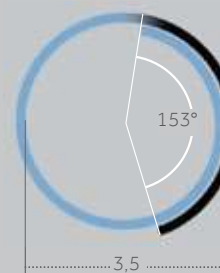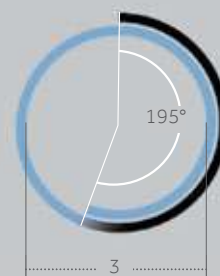

FENDA ABERTA, CÉLULA FECHADA ESTÁVEL


- Boa capacidade de entrega e protusão ou torção muito baixa¹
- Excelente conformabilidade e aposição na parede do vaso também em anatomias desafiadoras¹
- Implantação e recuperação suaves, mesmo quando totalmente implantado¹
- Alta resistência à deformação de células, para força radial otimizada e suporte da massa de mola ideal¹
- Geometria estável de células para navegação no microcateter e fio guia¹

MARCADORES RADIOOPACOS

O dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB, com seus marcadores proximal e distal, permite uma boa visualização do dispositivo para uma entrega adequada e precisa através do colo do aneurisma, mostrando a posição exata do dispositivo.

DETALHES DO DISPOSITIVO

- Controle otimizado de implantação e expansão
- Visualização otimizada e precisão na colocação do dispositivo
- Visualização otimizada do comprimento total do dispositivo
- Aprimoramento da visibilidade da zona de destacamento⁴

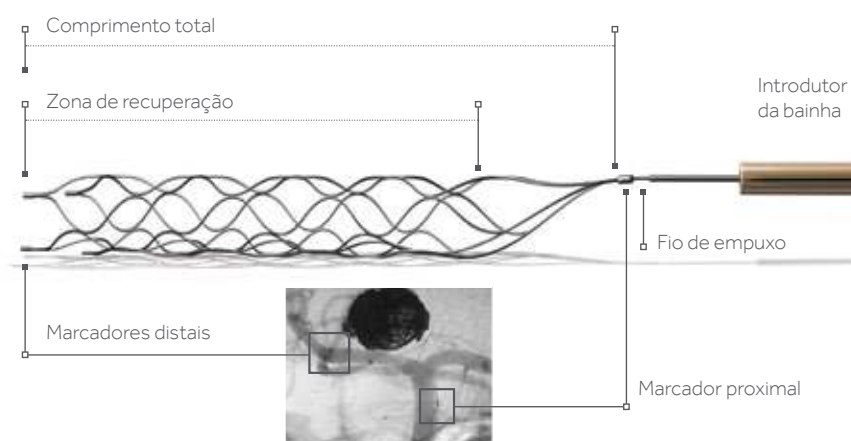

DISPOSITIVO DE REMODELAGEM NEUROVASCULAR SOLITAIRE™ AB

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

REFERÊNCIA NÚMERO	RECOMENDADO DIÂMETRO DO VASO (MM)	DIÂMETRO DO DISPOSITIVO (MM)	MÍNIMO MICROCATETER ID (POL)	DISTAL MARCADORES	PROXIMAL MARCADORES	COMPRIMENTO FUNCIONAL (MM) DIÂMETRO DO VASO (MM)					COMPRIMENTO TOTAL (MM) DIÂMETRO DO VASO (MM)				
						2,2	3	4	5	6	2,2	3	4	5	6
SAB-3-20	2,2 – 3,0	3	0,021	3	1	24,2	21,7				32,2	31,1			
SAB-3-30	2,2 – 3,0	3	0,021	3	1	36,6	32,1				44,8	41,1			
SAB-4-15	3,0 – 4,0	4	0,021	3	1		17,6	15,6				27,7	27,3		
SAB-4-20	3,0 – 4,0	4	0,021	3	1		22,5	20,6				33,1	32,1		
SAB-4-30	3,0 – 4,0	4	0,021	3	1		33,1	31,1				43,5	42,3		
SAB-4-40	3,0 – 4,0	4	0,021	3	1		44,3	40,2				54,2	51,6		
SAB-5-20	4,0 – 5,0	5	0,027	4	1			23,2	20,1				33,6	32,6	
SAB-5-30	4,0 – 5,0	5	0,027	4	1			32,4	29,1				42,9	41,8	
SAB-5-40	4,0 – 5,0	5	0,027	4	1			42,1	38,3				52,4	50,9	
SAB-6-20	5,0 – 6,0	6	0,027	4	1				19,6	17,9				32,7	32,3
SAB-6-30	5,0 – 6,0	6	0,027	4	1				30,9	28,3				43,9	42,8

Selecione um comprimento funcional do dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB para manter um mínimo de 4 mm de cada lado do colo do aneurisma ao longo do vaso-mãe.

DISPOSITIVO DE REMODELAGEM SOLITAIRE™ AB

O dispositivo de remodelagem Solitaire™ AB é um dispositivo operado por bateria que trabalha com cabos de destacamento projetados para iniciar e controlar o destacamento do dispositivo de remodelagem Solitaire™ AB.

CAIXA DE DESTACAMENTO

NÚMERO DO CATÁLOGO	DESCRIÇÃO
NDS-2X	Caixa de Destacamento Solitaire™

CONJUNTO DE CABOS

NÚMERO DO CATÁLOGO	COMPRIMENTO (MM)	QUANTIDADE
CSS-2.75-1X	2,75	1
CSS-2.75-5X	2,75	5

MICROCATETER REFORÇADO REBAR™

O microcateter Rebar™ é um microcateter reforçado com mola de aço inoxidável que oferece alta resistência a dobras para a entrega ideal do dispositivo. O microcateter Rebar™ é compatível com o sistema líquido embólico Onyx™.

NÚMERO DO CATÁLOGO (1/CAIXA)	D.E. (FR)	I.D. DISTAL (POLEGADAS)	COMPRIMENTO TOTAL (CM)	COMPRIMENTO FUNCIONAL (CM)	FIO-GUIA MÁX. (POLEGADAS)
REBAR™ 18					
105-5081-153*	2,4-2,7	0,021	158	153	0,018
REBAR™ 27					
105-5082-130	2,8-2,8	0,027	135	130	0,021

*Banda de Marcador Duplo

Referências

¹ IFU 70723-001 Rev. 06/13: O dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB é um projeto autoexpansível que pode ser completamente implantado e totalmente recuperado por um único operador. Se não for destacado e o monitoramento angiográfico revelar um posicionamento ou emaranhamento indesejado, o reposicionamento do dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB é permitido duas vezes.

² A Covidien possui o único stent AB eletrolítico destacável no mercado, o que permite a implantação completa do stent no vaso. Os stents de destacamento mecânico requerem que uma parte do dispositivo ainda permaneça no microcateter.

³ Embolização da mola de aneurismas de circulação anterior suportados pelo dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB. Joachim Klisch; Neuroradiology (2010) 52:349–359.

⁴ Zona de destacamento excessivo sem marcadores radiopacos.

O dispositivo de remodelagem neurovascular Solitaire™ AB é projetado para uso como um dispositivo adjuvante no tratamento de aneurismas intracranianos.

O microcateter Rebar™ destina-se à infusão seletiva controlada de agentes terapêuticos ou meios de contraste especificados pelo médico na vasculatura da periferia e da neuroanatomia.

Sistema Líquido Embólico Onyx™: Embolização de lesões no periférico e neurovascular, incluindo malformações arteriovenosas e tumores hipervasculares.

Indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo.

Registro ANVISA:
Dispositivo de Remodelação Neurovascular Solitaire™ AB - 10349000472
Onyx™ Agente Embolizante - 10349000454
Microcateter Rebar™ - 10349000460
Destacador Solitaire™ - 10349000578

© Medtronic 2019. Todos os direitos reservados. Abril/2019

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010, Brasil

Telefone: +55 11 2182-9200

medtronicbrasil.com.br