



AESCULAP[®] VenaTech Convertible

Sistema de filtro de veia cava

VENATECH CONVERTIBLE

DESIGN REVOLUCIONÁRIO E PERFORMANCE NOTÁVEL FAZEM DO FILTRO DE VEIA CAVA VENATECH CONVERTIBLE, O ÚNICO FILTRO OPCIONAL COM OTIMIZADO CONTROLE DO RISCO CLÍNICO.

A família de filtros de veia cava VenaTech proporciona uma escolha do filtro de acordo com as suas necessidades. Mais de 200.000 filtros VenaTech já foram implantados com sucesso em todo o mundo.

Atendendo às necessidades clínicas, o VenaTech Convertible combina o original design patenteado da cabeça com a tecnologia dos filtros VenaTech. A função de filtração do produto pode ser interrompida pela remoção da cabeça do filtro através de uma abordagem via jugular utilizando um laço.


O VenaTech Convertible possui a comprovada capacidade do VenaTech LP com a possibilidade de cessar a filtração pela simples remoção da cabeça do filtro e, assim, converter o filtro numa estrutura aberta a qual irá integrar-se totalmente ao interior da parede da veia cava.

EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE PARA O USUÁRIO

Combina as comprovadas características do VenaTech LP com uma tecnologia patenteada da cabeça do filtro.

Hastes estabilizadoras

- Auto-centrantes
- Garantia de uma ótima taxa de filtração

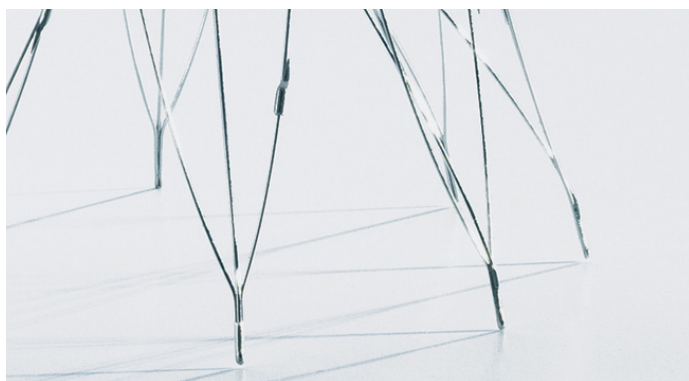

Duplo Sistema de entrega

- VenaTech Convertible pode ser implantado através da Jugular ou Femoral.



4 ganchos ascendentes e 4 ganchos descendentes para ancoragem


- Assegura a adesão do filtro à parede da veia cava
- Estimula a endotelização das hastes na parede venosa



Material Cromo Cobalto

- Alta visibilidade no Raio X
- Compatível com Ressonância Magnética
- Biocompatibilidade comprovada

CONVERSÃO PRECISA

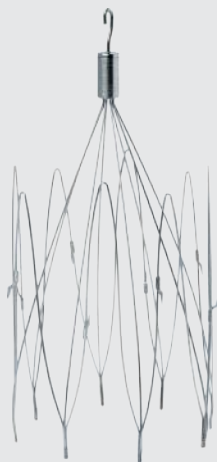

A FILTRAGEM PODE SER CESSADA
ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE UM CATETER
PERCUTÂNEO GUIADO POR IMAGEM QUE
REMOVE A CABEÇA DO FILTRO.

VENATECH CONVERTIBLE EM SUA
POSIÇÃO DE FILTRAGEM.

UM SIMPLES PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DE APENAS 3 PASSOS SOB FLUOROSCOPIA

- 1 | Posicione o
laço e a bainha
sobre o filtro.



- 2 | Enlace o gancho.
Exerça levemente
uma tensão sobre
o laço e então
avance com a
bainha para baixo
até que essa
cubra o gancho.



- 3 | Aumente a tensão
no laço até que a
cabeça do filtro
destrave.



VENATECH CONVERTIBLE
EM SUA POSIÇÃO NÃO
FILTRANTE

VENATECH CONVERTIBLE

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE FILTRO VENATECH CONVERTIBLE

	Sistema introdutor
	Filtro pré-carregado para abordagem Femoral ou Jugular
	Guia "J" revestido de PTFE, 150 cm de comprimento, 0,89mm (0,035 interno) de diâmetro

Especificações:

- Material: Cromo Cobalto
- Alta visibilidade radiográfica e compatível com Ressonância Magnética
- Abordagens Femoral ou Jugular
- Para veia cava de até 32mm
- Código: 4435140

B. Braun Brasil | Aesculap
Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000 | São Gonçalo | RJ | Brasil
S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

AESULAP® – a B. Braun brand



VenaTech Convertible - Registro ANVISA nº 80136990552

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

AE3527C-0817 | Agosto/2017